



Therma Tight

ART Monopolar RF Cihazı

*Yumuşak Dalgalar,
Derin Dönüşüm*



Therma Tight


1,15 MHZ ART RF, Yumuşak Dalgalar
Dual Mod, Derin Dönüşüm



Therma Tight

Gelişmiş ART (Otomatik Direnç Testi) Monopolar RF teknolojisi üzerine kurulu ve TEC temas soğutma sistemiyle entegre edilmiş Therma Tight, yüz anti-aging (yaşlanma karşıtı) ve vücut sıkılaştırma için tasarlanmış etkili ve güvenli bir termal RF cihazıdır.

"Stamp & Motion" (Derin Atış, Hareket) dual modu, enerjinin tüm dermis ve SMAS tabakasına nüfuz etmesini sağlayarak hassas, kişiselleştirilmiş bir tedavi ve olağanüstü etkiler sunar.

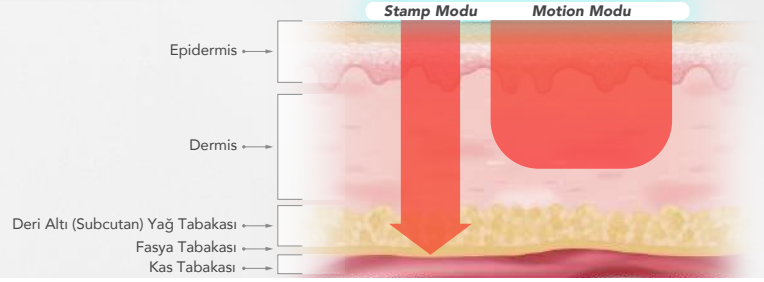

Monopolar RF

Therma Tight, 1,15 MHz ART monopolar RF teknolojisini kullanır. Enerjiyi hassas bir şekilde dermal tabakaya iletir, yüksek frekanslı bir elektrik alanı oluşturur ve lokal dokuda iyon salınımı ve friksiyona neden olur. Bu da moleküler termal hareketi başlatır ve nihayetinde termal bir etki üretir.

ART Teknolojisi:


(Otomatik DirençTesti)

Her atım, cilt direncine göre otomatik ve gerçek zamanlı olarak algılanır ve ayarlanır. Böylece optimum enerjinin müdahale edilen cilt bölgesine güvenli bir şekilde iletilmesi sağlanır.



4 Kademeli Ayarlanabilir TEC Soğutma

Hacimsel RF ısıtma enerjisi dermise nüfuz ederken, epidermis, epidermal TEC temas soğutma teknolojisi ve ters termal gradyan etkisi sayesinde çalışma boyunca serin kalır. 4 kademeli ayarlanabilir soğutma, optimum kontrol ve daha fazla konfor sağlar.

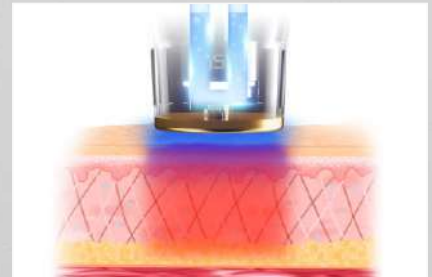

Dual Mod, 3D Enerji Isıtma

Dual Modlu kombinasyon, 3 boyutlu tam cilt katmanını ısıtması sağlar ve optimum cilt sıkılaştırma, lifting ve gerginleştirme sonuçları elde etmek için birlikte çalışır.

Stamp (Derin Atış) Modu

Odaklanmış hacimsel enerji anında açığa çıkar ve 3 farklı enerji çıkış hızında dermis ve SMAS tabakasına daha derinlemesine nüfuz eder: Hafif, Orta ve Güçlü.

Motion (Hareket) Modu

Sürekli enerji, kayar çalışmada daha yumuşak bir şekilde salınır, termal etki süresi daha uzundur ve termal difüzyon aralığı daha geniştir, bu da daha kalıcı bir termal etki sağlar.

%30 Daha Hafif Ergonomik Başlık, Kolay Kullanım



Ergonomik tasarımıyla tanışın



Tek tıklamayla çalışmayı başlatın veya durdurun



Uzun süreli kolay kullanım için %30 daha hafif tasarım

3 Değiştirilebilir Uç

Yüz ve vücudun çeşitli bölgelerinde etkili sonuçlar elde edebilmek için tasarlanmıştır



12.56cm²

Φ40: Geniş Uç

Omuzlar, sırt, karın, kollar ve uyluklar dahil olmak üzere vücut bölgeleri için tasarlanmıştır. Hareket modunda yüz ve yanaklara da uygulanabilir.



4.71cm²

Φ24.5: Yüz Ucu

Yüz lifting, jawline ve çene kontrolü, alın kırışıklıklarının azaltılması için özel olarak tasarlanmıştır.



2.54cm²

Φ18: Küçük Uç

Göz çevresi, burun çevresi, küçük ve kavisli bölgeler için tasarlanmıştır.



Dual Mod ve 3 Enerji Çıkış Hızı



Enerji iletim derinliği, farklı çalışma modları ve enerji çıkış hızları altında değişiklik gösterir ve 3 boyutlu enerji ısıtması sağlanır.

Gerçek Zamanlı Cilt Direnci Testi



ART Teknolojisi, her atış için gerçek zamanlı test ve ayarlamalar yaparak tüm cilt bölgelerinin optimum enerji almasını sağlar.

Güçlü Soğutma Sistemi



Sürekli su soğutma sistemi, makinenin uzun süre kesintisiz çalışmasını sağlar.

Ergonomik Tasarım



Daha ergonomik bir başlık, 360° dönebilen bir başlık braketi boyunca uzatılabilir ve bu da işlemi daha esnek, zahmetsiz hale getirir.

Akıllı Arayüz



Uçlar otomatik olarak seçilir ve farklı tedavi alanları seçildiğinde önceden ayarlanmış parametreler entegre edilir.

Sarf Malzemesi Olmayan Sistem



Dayanıklısıdır, kullanım ömrü boyunca sınırsızca kullanılabilir, sarf malzemesi yoktur, zaman kilidi sistemi yoktur, yüksek yatırım çıkışı sağlar.

Sonuçlar



ÖNCESİ

SONRASI


Nazolabial Kıvrımlar



ÖNCESİ

SONRASI

Kırışıklıkların Azaltılması

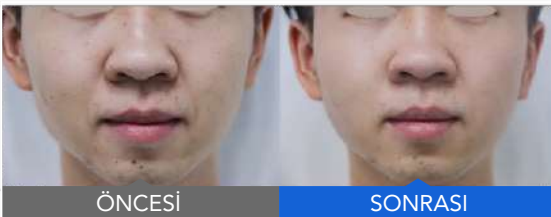

ÖNCESİ

SONRASI

Jawline Lifting



ÖNCESİ

SONRASI

Vücut Sıkılaştırma

Therma Tight Seanslarının Faydaları



Dinlenme Yok



Anestezi Gerektirmez



15+ Yıl
Klinik Deneyim



Destek
Çoklu Kombinasyonlu
Teknoloji

Teknik Özellikler

Sistem Tipi	Monopolar RF
RF Enerjisi	20-350J
Çıkış Frekansı	1.15MHz
Direnç Aralığı	25-350Ω
Çalışma Modu	Stamp/Motion
Uç Boyutu	φ40mm/φ24.5mm/φ18mm
Elektrik Gücü	90-260V, 50/60Hz
Boyutlar	1130x500x450mm
Net Ağırlık	35kg

