



# Bovine-6 Ag

Buzađı İshal Antijen Hızlı Test Kiti

**“Buzađı İshallerinde Anında Tanı!”**



- ① Bovine Rotavirüs
- ② Bovine Coronavirüs
- ③ E. coli K99
- ④ Cryptosporidium parvum
- ⑤ Clostridium difficile Toxin B
- ⑥ Giardia Ag

Daha fazlası için;



## Test Prosedürü

1

Siğirdan Taze Dışkı /  
Rektal Swab Numunesi Alınır




2

Numune 30 sn  
Ekstrakte Edilir.




3

Tüm Kuyucuklara  
3 Damla Damlatılır

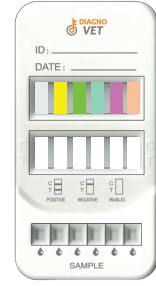

4

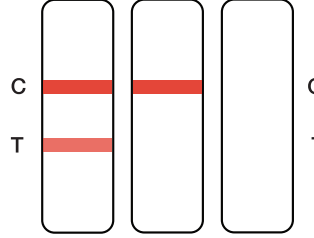

Pozitif Negatif Geçersiz

Performance Criteria	Rota Ag	Corona Ag	E coli K99 Ag	Cryo Ag	GIA Ag	Clost- Tox-B Ag
Specificity	98,97	96,26	98,72	96,61	99,13	98,86
Sensitivity	97,73	95,54	96,55	97,06	98,57	100
Accuracy	98,37	95,89	98,13	96,77	99,00	99,18

### Özellikler

- ✓ **Metot:** İmmürokromatografik analiz
- ✓ **Tür:** Bovine (Siğir)
- ✓ **Numune:** Taze Dışkı/ Rektal Swab
- ✓ **Test Süresi:** 10 dk
- ✓ **Kutu Bileşenleri:** 10 adet kit/kutu
- ✓ **Muhafaza:** 2~30°C

### Genel Özellikler

- ✓ Çoklu Etken Taraması
- ✓ Yerli Suşlara Uyumluluk
- ✓ Yüksek Duyarlılık
- ✓ Kullanım Kolaylığı
- ✓ Hızlı Sonuç
- ✓ Teknik Destek

Bovine-6 Ag, Erken teşhis, yalnızca tedavi başarısını değil; sürü verimliliğini, hayvan sağlığını, büyüme performansını ve çiftlik kârlılığını artırır. Farklı patojen grupları, benzer klinik belirtilerle seyredebilir; bu nedenle doğru tanı ve tedavi için etkenin belirlenmesi şarttır.